

Sixtus hi-tech
Italia 



URTO SIX[®]
— EMC —



URTOSIX[®]

— EMC —

è un'apparecchiatura per la terapia a onde d'urto non focali (radiali) dette anche shockwave, che cambia radicalmente la metodologia terapeutica di molteplici patologie riguardanti il sistema muscolo- scheletrico. Il corpo sottoposto a una intensa energia meccanica risponde con **L'AUMENTO DELL'ATTIVITÀ METABOLICA** nella zona di applicazione, favorendo la **DIMINUZIONE DELL'INFIAMMAZIONE** e **UN'AZIONE ANTIDOLORIFICA** indotta dalla liberazione locale di endorfine, stimolando e accelerando così, il processo di guarigione.

UrtoSix[®] emc rappresenta il miglior compromesso tra performance e praticità, erogando fino a 185 mJ (paragonabili a circa **6 BAR** del sistema pneumatico) di energia a frequenza variabile con un design di dimensioni contenute finalizzato alla massima trasportabilità dell'unità.

Diminuisce anche la sensazione dolorosa grazie ad una migliore distribuzione delle onde pressorie, permettendo all'operatore di ottenere **MIGLIORI RISPOSTE** terapeutiche

Le principali applicazioni sono impiegate nei seguenti campi:
Ortopedia, Riabilitazione e Medicina dello sport.

- GOMITO:** epicondilite, epitrocleite;
- SPALLA:** tendinopatie inserzionali, impingement;
- GINOCCHIO:** tendinopatie del rotuleo e della zampa d'oca;
- MANO:** rizoartrosi
- PUBE:** tendinopatie degli adduttori (pubalgie);
- ANCA:** coxartrosi
- CAVIGLIA:** tendinopatie dell'Achilleo, apofisi calcaneari.
- GENERICO:** borsiti, periostiti da fratture da stress, periostiti reattive, tendiniti e tendinopatie, tendoperiostite

3 MODALITÀ DI LAVORO

Si può scegliere di lavorare con 3 modalità differenti: **MANUALE**, **PROTOCOLLI PREIMPOSTATI** e **PROGRAMMI PERSONALIZZATI**.

Nella modalità **MANUALE** è possibile impostare: il numero di fasi da 1 a 3, l'intensità da 60 a 185 mJ, la frequenza da 1 a 22 Hz, la modalità di erogazione continua o a treni di impulsi 4/8/12 e il numero totale di colpi per ciascuna fase da 100 a 3000. Tali parametri possono essere modificati anche durante il trattamento.

Nella modalità **PROTOCOLLI PREIMPOSTATI** è possibile scegliere tra programmi di terapie per ben 33 patologie diverse, e sempre con la possibilità di modifica durante il trattamento.

Nella modalità **PROGRAMMI PERSONALIZZATI** è possibile programmare e memorizzare la macchina con i parametri scelti dall'operatore in base alle sue esigenze ed esperienze.



33 PROTOCOLLI PREIMPOSTATI:

I programmi memorizzati proposti sono il frutto dell'esperienza operativa maturata in anni di supporto dagli utilizzatori professionalmente esperti e saranno utili come suggerimento guida per iniziare il trattamento; la possibilità di modificare i parametri in base alle esigenze dell'operatore garantisce una versatilità di utilizzo indispensabile in contesti medico fisioterapici.

borsite del troc. Acuto, borsite del troc. Cronico, calcif. spalla acuta, calcif. spalla cronica, contrattura di dupuytren, coxoartrosi, epicondilite rad. Acuta, epicondilite rad. Cronica, epicondilite uln. Acuta, epicondilite uln. Cronica, epitrocleiti, fascite plan-

tare acuto, fascite plantare cronica, periostite tibiale acuto, periostite tibiale cronico, rizoartrosi acuta, rizoartrosi cronica, strappo muscol. Acuto, strappo muscol. Cronico, tallone calcaneare acuto, tendine di achille acuto, tendine di achille cronico, tendinite

spalla acuta, tendinite spalla cronica, tendinite patell. Acuta, tendinite patell. Cronica, tendinopatia pat. Acuta, tendinopatia pat. Cronica, tendoperiostite, trig.p. miof. collo acuto, trig.p. miof. collo cronico, trig.p. miof. schiena acuto, trig.p. miof. schiena cronico.


CARATTERISTICHE:



- Energia erogata: 60÷185 mJ
- Modalità di erogazione: 4 (continuo/4/8/12 treni di impulsi)
- Frequenza di lavoro: 1÷22 hz Regolabili
- Applicatori: 6/15/25mm
- Durata Proiettile: 2 milioni di colpi
- Alimentazione: 90-240 Vac / 50-60 Hz
- Potenza massima assorbita: 250 VA
- CE0051

NOVITÀ:

- Display touchscreen da 7 Pollici
- Interfaccia Software User Friendly
- Aggiornamenti tramite porte USB
- Controllo del dispositivo tramite display touchscreen, encoder e tramite tastiera
- Protocolli selezionabili
- Programmi personalizzabili
- Sistema di sicurezza Security slot
- 6 lingue selezionabili

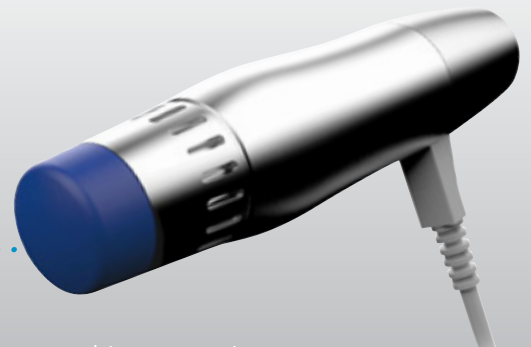

Gli apparecchi per terapia ad onde d'urto UrtoSix® emc sono dotati di una **PISTOLA ELETTRO-MAGNETICA** da 2 milioni di colpi, e 3 diverse testine intercambiabili che permettono una ampia gamma di trattamenti su ogni tipo zona del corpo e a profondità diverse. La tecnologia adottata rende estremamente economica la sostituzione del proiettile, diminuendo enormemente i costi di gestione.



THE PROFESSIONALS' CHOICE

2017 - 2018



Sixtus 
Italia

La leadership di Sixtus nel proprio settore è ben testimoniata dalla notorietà dei partners sportivi. Oltre alla principali Federazioni, l'azienda infatti è fornitore ufficiale anche della maggior parte dei club di calcio di serie A e B, come pure di numerose squadre di basket, volley, rugby, ciclismo, hockey, ecc. A tutto questo vanno aggiunti anche i più qualificati Istituti medici e fisioterapici ed i numerosi punti vendita che quotidianamente si avvalgono dei prodotti e dei servizi che Sixtus mette loro a disposizione.

"Ogni giorno diamo il massimo per cercare soluzioni innovative da proporre ai nostri clienti. Crediamo che per rimanere competitivi sia necessario guardarsi intorno e migliorarsi continuamente", così parlano i fondatori dell'azienda e questo è lo spirito con cui Sixtus lavora da oltre 40 anni.



Via Tourcoing, 23 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 7561 - Fax 0574 756211
info@sixtus.it

www.sixtus.it

FOLLOW US ON   

Dati, descrizioni, dimensioni, pesi, illustrazioni sono puramente indicativi. Il produttore si riserva il diritto di modificarli senza preavviso. Materiale tecnico informativo riservato a personale specializzato. Vietata la diffusione al pubblico.